
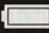


# AV-2010V Guía rápida de uso

## Información en pantalla:

Hospital	Nombre	Edad	Sexo
HOSP:	NAME:	AGE:	SEX:



09-01-07   
15:55:21  
PROB: SEC-18  
FREQ: 3.5MHz  
GAIN: 30 IM0  
\* :32 ● :32  
IC0/CC0/BC0

Indicador carga batería  
Información de la sonda  
Frecuencia de la sonda  
Ganancia / Procesado de imagen  
Brillo / Contraste  
Código de colores

170

## Tipos de carga de la batería:



Carga de la batería al ecógrafo




Carga directa de la batería a 220V



Carga directa de la batería a 12V

# AV-2010V Guía rápida de uso

Al presionar el botón de encendido, aparece en la pantalla un mensaje de bienvenida:

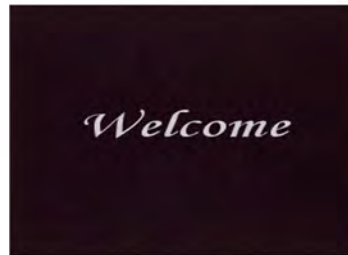



Presione cualquier tecla, excepto FREEZE o RESET, para entrar en el modo de escaneo.





## Indicador de carga de la batería

**POWER:** Led de encendido

**FREEZE:** Botón para congelar la imagen

**ZOOM:** Magnificación.  
Se ajusta en un rango de 65 a 190 mm (recomendado 120 mm)  
Si presionamos  aumentamos el Zoom, y si presionamos  lo disminuimos.



Botones para modificar la frecuencia ( 5 ), ganancia ( 4 ), el brillo ( 3 ) y el contraste ( 6 ).  
Presionando  o  con la imagen en movimiento, seleccionamos cada uno de los parámetros, y presionando los botones  o  aumentamos o disminuimos los valores de cada uno de ellos.

(Entre paréntesis se indica el valor recomendado).



Conector para el cargador

Botón de encendido / Apagado

**Aviso:** Para evitar un malfuncionamiento del motor de la sonda, debe trabajar al menos a 15°C en el momento del diagnóstico.

