




T-300 Guía rápida de uso


Presionamos  para iniciar el equipo. Se mostrará la siguiente pantalla:




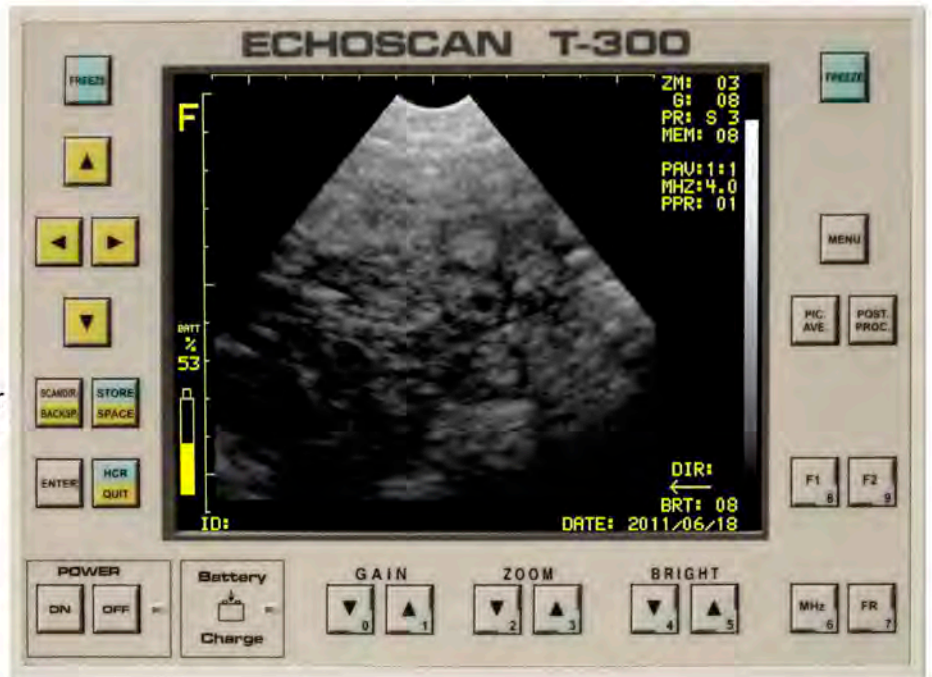
Aparece seleccionado B SCAN. Presionamos  para comenzar a trabajar.


Para realizar los ajustes de imagen utilizamos los siguientes botones:


 **ZOOM:** Para modificar la profundidad de escaneo. Valor recomendado de diagnóstico de gestación: **ZM:04**
Valor recomendado de medición de grasa dorsal: **ZM:01**

 **GAIN:** Para modificar el valor de ganancia del ultrasonido. Valor recomendado: **G:08**


 **BRIGHT:** Para modificar el valor de brillo de la imagen. Valor recomendado: **BRT: 08**





 **POST. PROC.:** Para modificar el procesamiento posterior de la imagen. Valor recomendado: **PPR: 01**

 **MHZ:** Para modificar la frecuencia del ultrasonido. Valor recomendado: **MHZ: 4.0**


Para ejecutar otras funciones importantes, utilizaremos los siguientes botones:

 **FREEZE:** Para congelar la imagen, revisarla y posteriormente tener la posibilidad de almacenarla. Presionando de nuevo en este botón, la imagen se descongelará y se borrará.


 **STORE:** Para almacenar hasta un total de 7 imágenes. Una vez congelada la imagen, presionamos este botón para acceder a otra memoria en la cual comenzaremos a trabajar, guardando de esta manera la anterior. Si seleccionamos una imagen almacenada previamente, al descongelarla, la imagen se borrará.


 **MENU:** Para acceder al menú inicial desde el modo B. Con la imagen congelada, se accede al menú de la imagen congelada (FMENU):



 **HCR:** Para mostrar el primer cursor cuando se quiere realizar mediciones.

QUIT: Para salir de la mayoría de las funciones.

 **OFF:** Para apagar el equipo.

 Botones de dirección, para mover los cursores durante las mediciones, o para seleccionar cada una de las funciones en los menús.

T-300 Guía rápida de uso

Conexión de la sonda:



Para conectar la sonda hacemos coincidir el punto rojo de la sonda....



....con la muesca, indicada de color rojo, del conector del ecógrafo,.....



.....presionando hasta el final.

Para desconectar la sonda, realizamos el proceso inverso tirando de la zona con relieve del conector.

Panel de conexiones del ecógrafo:



Conector para el cargador



Conector para la sonda






Conector para el cable USB



Led de carga:

Cuando es necesario cargar el ecógrafo, se conecta el cargador y se iluminará el led indicador de carga, inicialmente, de color naranja. Al cabo de 4,5 horas, cambiará a verde, continuando la carga durante media hora más, hasta que finalmente se apaga.

Entonces la carga será completada.

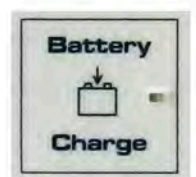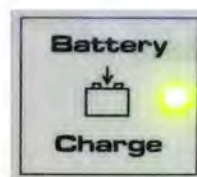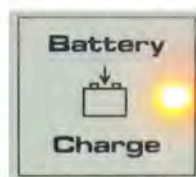

Para un funcionamiento correcto de la batería, se recomienda:
Hacer descargas y recargas completas de la batería una vez por semana.
Guardar el ecógrafo completamente cargado en periodos largos de inactividad.
No almacenar el ecógrafo en condiciones extremas de temperatura.