

PARAMETROS PARA EL CONTROL DIGITAL OK-51 DE LA NEVERA DE TRANSPORTE

LA NEVERA YA VIENE AJUSTADA Y SOLAMENTE SE TIENE QUE VARIAR EL SET EN CASO DE QUE SE QUIERA TRABAJAR CON UNA TEMPERATURA DISTINTA A LA PROGRAMADA QUE POR DEFECTO ES DE 16 °C

EN ROJO (temperatura actual del interior de la nevera)

Programación del valor de regulación deseado:

1-Pulsar SET y soltar

En el display se visualizará SP1 en intermitente y sus correspondientes valores actualmente programados.

2-Pulsar las flechas de **subir o bajar** hasta alcanzar el valor deseado.

3-Finalmente pulsar SET una vez para confirmar el valor.

PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DIGITAL EN CASO QUE SE TENGA QUE ACCEDER PARA ALGUNA APLICACIÓN O MODIFICACIÓN ESPECIAL.

Para acceder a una modificación de estas características nos hará falta un código de acceso para poder entrar en programación. pónganse en contacto con el servicio técnico del distribuidor de sus neveras.